

GUIDE SIMPLIFIE DU PRELEVEUR

ANALYSES SANGUINES - PLATEAU TECHNIQUE

Ordre de prélèvement des tubes



Prendre un tube neutre avant le tube citrate en cas de ponction avec aiguille LPS (Butterfly).

Renseignements obligatoires

Nom - Prénom
 Date de Naissance } (FT* + Tube)
 Nom de naissance }
 Coordonnées du Patient (FT)
 Date et Heure du Prélèvement (FT)
 Identification du Prélèveur (FT)
 Renseignements cliniques (FT)
 Pour le dosage de médicament : nom du médicament,
 posologie, date et heure de dernière prise (FT)

* FT : Fiche de Transmission de Prélèvement
 SEL-PRE-5.4ENR-006

	Tube de purge		EDTA avec gel (P)
	Citrate (P)		EDTA + Aprotinine (P)
	Sec sans gel (S)		Fluorure de Sodium (P)
	Sec avec gel : grand et petit (S)		Tube chimie urinaire
	Héparinate de lithium (P)		Tube borate
	EDTA (P)		Tube Oligo-éléments



Délais d'acheminement < 6h sauf indication contraire

Les échantillons doivent être regroupés dans un sachet individuel et transportés en mallette isotherme.



GUIDE SIMPLIFIE DU PRELEVEUR – MANOSQUE

SEL-PRE-5.4MT-085-01 Page 2 sur 2

BIOCHIMIE - SEROLOGIE	URINES	HEMATOLOGIE -	HEMOSTASE	DIVERS
Acide urique Albumine ASAT/ALAT/GGT Bicarbonates Bilirubine Tet C Calcium Cholestérol HDL*/LDL* CPK Créatinine Fer* Glucose* Iono (Na, K, Cl, RA) LDH Lipase PAL PCR Protéines Totales Transferrine Triglycérides* Urée Glucose * à domicile	 Acétone, nitrites Acide urique Amylase Calcium Créatinine Glucose Ionogramme Magnésium Microalbumine Phosphore pH et densité Protéine Sels et pigments biliaires Urée	 NF Plaquettes VS Réticulocytes Schizocytes Paludisme	 TP TCK TCA avec HNF Fibrinogène Héparinémie (HNF) Héparine (HBPM) Facteurs AntiPF4 Anti-thrombine III DDimères <u>si urgent+</u> PTH  	Electrophorèses sériques (ELP, IFIX, CDT) Protéine C Protéine S Ac anti CCP Groupe Sanguin RAI (2 tubes) Photocopie de la CNI
ACE AFP Amylase CA 125/ 15.3/CA19.9 Carbamazépine Cortisol 1 Dépakine(ac valproïque) Digoxine Folate (B9)* Ferritine FSH/LH Haptoglobine HIV Lithium Magnésium Myoglobine Oestradiol Orosomucoïde Phénobarbital Phosphore Préalbumine Progestérone Prolactine Procalcitonine PSA totale et libre Rubéole T3 T4 TSH Toxoplasmose Troponine si urgent+ VHA VHB VHC Vancomycine Vitamine B12 Vitamine D β HCG		HBA1c 	BNP  	Cryoglobulines* Examen soumis à condition IDE : se rapprocher du laboratoire. Sur CPA: se référer au document SEL-PRE-5,4ENR-018
IGE/A/G/M β2 - microglobuline Syphilis BW ASLO ATPO/ATG DHEA (sulfate de) EBV CMV Facteur Rhumatoïde Testostérone totale		Toxines urinaires (RECUEIL au LABORATOIRE) Amphétamine Cannabis Cocaïne Morphine	Ammoniémie  Lactate  Alcool 	ACTH 1  A domicile EDTA+Aprotinine Au laboratoire se référer au document SEL-PRE-45,4IT-001 
Sérologie Covid 				Pour toute analyse ne figurant pas sur ce guide, merci de vous rapprocher de votre laboratoire.
Pensez à prendre un tube supplémentaire pour toute sérologie et β HCG 	MNI Test 			

A ramener dans les 2 heures - A ramener dans les 4 heures - Uniquement au laboratoire * A jeun_ 1 Prlv avant 9 heures